

5. 메모리 기능 사용

최대 30개 판독값을 동시에 저장합니다.

5.1 메모리에 저장된 판독값 확인

1. ① 버튼을 누릅니다.



맥박수가 표시되기 전에 메모리 번호가 1.5초 동안 나타납니다. 메모리에 가장 최근에 저장된 판독값이 “1”이 됩니다.

참고

- 판독값이 높은 경우(하위 섹션 1.3 참조) “■” 기호가 나타납니다.
- 메모리에 저장된 판독값이 없을 경우 오른쪽 표시부 화면이 표시됩니다.
- 메모리가 가득 차면 가장 오래된 판독값부터 새 판독 값이 이전 판독값을 덮어습니다.

2. 메모리에 저장된 이전 판독값을 스크롤 하려면 ④ 버튼을 반복해서 누릅니다.

6. 기타 설정

6.1 혈압계를 기본 설정으로 복원

혈압계에 저장된 모든 정보를 삭제하려면 아래 치침을 따릅니다. 혈압계가 깨끗인지 확인하십시오.


1. ① 버튼을 누릅니다.

메모리 번호가 나타나면 가장 최근 판독값과 함께 나타납니다.

2. ④ 버튼을 길게 누른 상태



3. 다시 ④ 버튼을 길게 누른 상태에서 4초 이상 동안 [START/STOP](시작/정지) 버튼을 길게 누릅니다. 표시부가 점멸합니다.

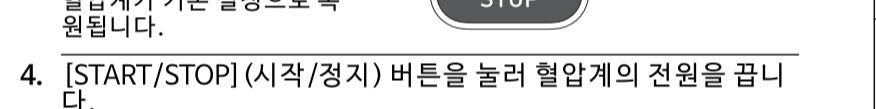

4. [START/STOP](시작/정지) 버튼을 눌러 혈압계의 전원을 끕니다.

참고

- 혈압계를 기본 설정으로 복원해도 앱의 정보는 삭제되지 않습니다.
- 10초 후에 혈압계가 자동으로 거집니다.

7. 예외 메시지 및 문제 해결

측정 중에 아래 문제 중 하나가 발생할 경우 다른 전자 기기나 30cm내에 있는지 확인해야 합니다. 문제가 지속될 경우 아래 표를 참조하십시오.

표시부 / 문제	가능한 원인	해결책
판독값이 이상하게 높게 측정됩니다.	[START/STOP](시작/정지) 버튼을 다시 눌러 혈압계의 전원을 끕니다.	혈압은 시시각각 변화하고 있습니다. 커프의 착용 방법 및 측정 차세를 포함한 여러 요인이 혈압에 영향을 미칠 수 있습니다. 하위 섹션 2.2~2.4 및 섹션 3을 참조하십시오.
E1 이 나타나거나 커프가 가압되지 않습니다.	자세한 도움을 받으려면 스마트 기기와 표시되는 지침을 듣거나 “OMPON connect” 앱의 “도움말” section을 방문하십시오. 문제가 계속될 경우 해당 지역 오른쪽 표시부 화면이 표시됩니다.	이제 톰과 그가 연결되거나 앱을 통해 스마트 기기와 커프를 연결하는 경우 표시되는 지침을 듣거나 “도움말” section을 방문하십시오. 문제가 계속될 경우 해당 지역 오른쪽 표시부 화면이 표시됩니다.
E2 이 나타나거나 커프가 가압된 후 측정을 완료할 수 없습니다.	커프를 제대로 적용하지 않았습니다.	커프를 제대로 적용한 다음 다시 측정하십시오. 하위 섹션 2.3을 참조하십시오.
E3 이 표시됩니다.	커프가 최대 허용 압력을 초과하여 가압되었습니다.	측정하는 동안 커프를 만지거나 에어 투브를 구부리거나 마십시오. 커프를 수동으로 가압하는 경우 하위 섹션 3.1을 참조하십시오.
E4 이 표시됩니다.	측정 중에 움직이거나 말했습니다. 진동으로 인해 측정할 수 없습니다.	측정 중에 움직이지 않고 말하지 마십시오.
E5 이 표시됩니다.	커프를 제대로 적용한 다음 다시 측정하십시오. 하위 섹션 2.3을 참조하십시오.	커프를 제대로 적용한 다음 다시 측정하십시오. 하위 섹션 2.3을 참조하십시오.
E6 이 표시됩니다.	맥박 수가 제대로 감지되지 않습니다.	측정 중에 움직이지 않고 말하지 마십시오.
E7 측정 중에 점멸하지 않습니다.	커프를 제대로 적용한 다음 다시 측정하십시오. 하위 섹션 2.3을 참조하십시오.	커프를 제대로 적용한 다음 다시 측정하십시오. 하위 섹션 2.3을 참조하십시오.
E8 이 표시됩니다.	[START/STOP](시작/정지) 버튼을 다시 누릅니다. “Err” 기호가 계속해서 나타날 경우 의사와 상담하는 것이 좋습니다.	혈압계가 오작동했습니다. “Err” 기호가 계속해서 나타나는 경우 의사와 상담하는 것이 좋습니다.
E9 이 표시됩니다.	“OMPON connect” 앱에 표시된 지침을 따릅시오. 앱 접속 후에는 “Err” 기호가 계속 나타나는 경우 해당 지역 오른쪽 표시부에 문의하십시오.	혈압계가 스마트 기기와의 페어링에 대한 하위 섹션 4.1을 참조하십시오. “Err” 기호가 계속 나타나는 경우 해당 지역 오른쪽 표시부에 문의하십시오.
P 이 점멸합니다.	혈압계가 스마트 기기와의 페어링을 기다리는 중입니다.	혈압계 및 기타 구성품은 보관용 케이스에 보관하십시오.
24개 이상의 판독값은 전송되지 않습니다.	페어링하고 마친 전 또는 충성(천연) 세제에 적신 부드러운 천으로 혈압계 및 커프를 세척한 다음 마른 천으로 물기를 닦으십시오.	다음과 같은 경우 혈압계 및 기타 구성품은 보관하지 마십시오.
이 표시됩니다.	혈압계가 스마트 기기와 페어링되지 않거나 연결되지 않아 연결을 재설정하는 경우입니다.	• 혈압계 및 기타 구성품이 젖은 경우. • 고온, 다습, 직사광선, 먼지 또는 표백제와 같은 부식성 기포에 노출된 경우. • 진동 또는 충격에 노출된 강소.
이 점멸합니다.	예모리에 전송할 판독값이 30개 있습니다.	• 부드럽고 마른 천 또는 충성(천연) 세제에 적신 부드러운 천으로 혈압계 및 커프를 세척한 다음 마른 천으로 물기를 닦으십시오. • 혈압계 및 커프 또는 기타 구성품은 물로 씻거나 담그지 마십시오. • 혈압계 및 커프 또는 기타 구성품을 세척하기 위해 훈련유, 시너 등을 사용하지 마십시오.
이 표시됩니다.	전전자가 부족합니다.	8.3 세척
A 및 R 나타나거나 축정 중에 혈압계가 가기지 않게 깨집니다.	전전기가 부족합니다.	• 미오성 또는 휘발성 세척제를 사용하지 마십시오. • 부드럽고 마른 천 또는 충성(천연) 세제에 적신 부드러운 천으로 혈압계 및 커프를 세척한 다음 마른 천으로 물기를 닦으십시오. • 혈압계 및 커프 또는 기타 구성품은 물로 씻거나 담그지 마십시오. • 혈압계 및 커프 또는 기타 구성품을 세척하기 위해 훈련유, 시너 등을 사용하지 마십시오.
혈압계 표시부에 아무것도 나타나지 않습니다.	전전지가 깨진 것입니다.	• 본 혈압계의 정확도는 신중하게 테스트 되었으며 오래 사용하도록 설계되었습니다. • 경비의 올바른 작동과 정확도를 유지하려면 2년에 한번씩 정기적으로 검사를 하는 것이 좋습니다. 오른쪽 고객 서비스 센터로 문의하여 주십시오.

8. 유지보수

8.1 유지보수

혈압계가 손상되지 않도록 하려면 아래 치침을 따릅니다.

• 어떤 경우에도 본인 자신이 수리하지 마십시오.

8.2 보관

측정 중에 움직이거나 말하거나 커프가 충분히 가압되지 않았습니다.

• 본 혈압계 또는 기타 구성품을 분해하거나 수리하지 마십시오. 정확하게 측정할 수 없습니다.

8.3 세척 및 기타 구성품은 사용하지 않을 때 보관용 케이스에 보관하십시오.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 제거하려면 투브 자체가 아닌 투브 베이스에서 플라스틱 에어 투브를 잘고 당기십시오.

8.4 허용되는 환경

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.5 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.6 배터리 관리

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.7 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.8 배터리 관리

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.9 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.10 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.11 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.12 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.13 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.14 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.15 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.16 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

• 에어 투브를 무리하게 꺾거나 휘지 마십시오.

8.17 전기적 위험

측정 중에 움직이거나 말했습니다.

• 혈압계에 윤활유를 넣거나 커프를 수분으로 씻거나 담그지 마십시오.

• 에어 투브를 커프에 가볍게 감아서

<p