

NEB-ASKIT-16

네블라이저 액세서리 세트

All for Healthcare

5664158-5D

오므론 네블라이저 액세서리 세트(NEB-ASKIT-16)를 구입해 주셔서 감사합니다.
네블라이저 키트, 마스크, 마우스피스 및 에어 튜브를 한 명의 환자께 사용해야 합니다.




적절한 사용을 위한 전체 지침은 본체에 포함된 사용 설명서를 참조하십시오.
본 사용 설명서를 철저히 준수하십시오.
본 설명서는 항상 가까이 두고 참조하여 주십시오.

용도

사용목적

이 제품은 호흡 질환용 흡입 요법으로 사용합니다. 네블라이저 키트 및 부속품은 한 명의 환자가 여러 번 사용할 수 있습니다.

구성품

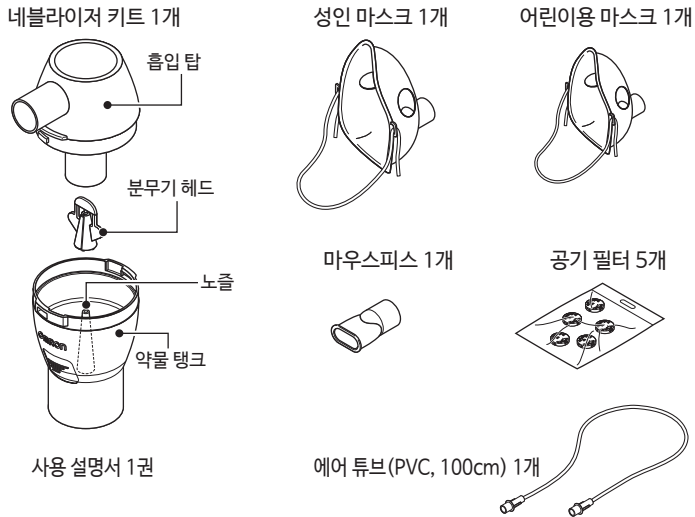

사용 후 관리 방법

- 약물 탱크에서 흡입 탭을 제거합니다.
[1] 흡입 탭을 반시계 방향으로 돌립니다.
[2] 흡입 탭을 들어 올립니다.
- 흡입 탭, 약물 탱크, 마스크, 마우스피스
따뜻한 물과 중성 세제로 씻으십시오. 깨끗하고 따뜻한 수돗물에 철저히 씻고
깨끗한 장소에서 공기 중에 건조시킵니다.
- 분무기 헤드
흐르는 물에 씻습니다.

사용 방법

1. 약물 탱크에서 흡입 탭을 제거합니다.
[1] 흡입 탭을 반시계 방향으로 돌립니다.
[2] 약물 탱크에서 흡입 탭을 들어 올립니다.
2. 분무기 헤드가 약물 탱크에 있는지 확인하십시오.
3. 규정된 약물의 정확한 양을 약물 탱크에 넣으십시오.
4. 약물 탱크에 흡입 탭을 다시 부착합니다.
[1] 약물 탱크에 흡입 탭을 내려 놓습니다.
[2] 흡입 탭을 시계 방향으로 돌립니다.
5. 네블라이저 키트에 마우스피스 또는 마스크를 단단히 부착합니다.
6. 에어 튜브를 콤프레서 및 네블라이저 키트에 부착하십시오.
에어 튜브를 약간 비틀어서 에어 튜브 커넥터에 단단히 눌러 끼웁니다.

기술 데이터

작동 온도 / 습도	+10 ~ +40° C/30 ~ 85% RH(비응축) / 700 ~ 1060hPa
------------	--

보관 및 운반 온도 / 습도	-20 ~ +60° C/10 ~ 95% RH(비응축)
수량	네블라이저 키트 1개, 성인 마스크 1개, 어린이용 마스크 1개, 사용 설명서 1권, 마우스피스 1개, 공기 필터 5개, 에어 튜브(PVC, 100cm) 1개
내구 연한	네블라이저 키트, 마우스피스, 에어 튜브(PVC), 마스크 - 1년 공기 필터 - 60일

⚠ 경고

다음과 같은 경우 네블라이저 키트, 마스크 및 마우스피스를 사용하기 전에 세척 및 소독하십시오.

- 구입 후 처음 사용하는 경우
- 오랫동안 장치를 사용하지 않은 경우
- 두 명 이상이 동일한 장치를 사용하는 경우

⚠ 주의

분무기 헤드 취급

- 사용한 후에는 항상 분무기 헤드를 세척하십시오.
- 브러시 또는 핀을 사용하여 분무기 헤드를 세척하지 마십시오.
- 부품을 끓는 물에 소독하는 경우 많은 양의 물을 사용해야 합니다.
- 물에 끓일 때 분무기 헤드를 해당 분무기 액세서리 이외의 물체와 함께 넣지 마십시오.

이 제품은 NE-C106의 액세서리입니다.

Importer in Republic of Korea

수입판매원:

OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd.

A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

Customer Service Center(1544-5718)

www.omron-healthcare.co.kr

한국오므론헬스케어(주)

서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층 (서초동, 교보타워)

오므론 고객센터 서비스 센터(1544-5718)

Manufacturer

제조회사:

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

Production facility

제조자:

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.

No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,

Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,

Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam

사용설명서 작성년월 : 2025 년 04 월

Made in Vietnam