



## 7. 유지 관리

### 7.1 유지 관리

손상으로부터 체중계를 보호하려면 아래 설명을 준수하십시오 .

- 중성 ( 전연 ) 세제에 적신 부드러운 마른 천으로 체중계를 닦아 주십시오 .
- 플레이트는 부드러운 천에 알코올을 묻혀서 닦아 주십시오 .
- 체중계를 깨끗하고 안전한 장소에 보관합니다 .
- 연마성 또는 휘발성 세척제 , 휘발유 , 시너 또는 유사한 용제를 사용하여 체중계를 닦지 마십시오 .
- 체중계를 물에 담귀 닦지 마십시오 .

### 7.2 적절한 보관

체중계를 사용하지 않을 때 자동으로 다시 보정됩니다 . 자동 보정이 작동하지 않는 경우 체중계 수동 보정 방법에 대해 section 8 을 참조하십시오 . 자동 보정을 위해 아래 이미지에 표시된 것처럼 체중계를 보관하지 마십시오 .



## 8. 보정

체중계를 보정하려면 아래 설명을 준수하십시오 .

- 체중계를 단단하고, 평평한 바닥에 놓으십시오 .**
- 체중계 표면을 손으로 눌러 전원을 켜십시오 .**
- "0.0kg" 이 표시되면 1 분 동안 기다린 후 체중계를 끕니다 .** 그런 다음 측정할 수 있습니다 .

## 9. 사양

제품 설명	디지털 체중계
모델	HN-300T2
표시부	5 ~ 150kg, 증분 단위 0.1kg
체중 정확성	5kg ~ 150kg: ± (1% + 0.1kg)
전송 방법	<b>Bluetooth</b> <sup>®</sup> 저에너지
무선 통신	주파수 범위 : 2.4GHz(2400 – 2483.5MHz) <p>변조 : GFSK</p> <p>유효 방사 출력 : &lt; 20dBm</p>
전원 공급	"AAA" 배터리 4 개
배터리 수명	약 3 개월 : 망간 배터리 사용 <p>약 6 개월 : 알카라인 배터리 사용</p> <p>( 각각의 배터리 유형을 실내 온도 23° C 에서 하루에 2 회 측정 , 2 회 데 이터 전송한 경우 )</p>
작동 조건	+5 ~ +40° C, 30 ~ 85% RH( 비응축 ) , 860 ~ 1060hPa
보관 조건	-20 ~ +60° C, 10 ~ 95% RH( 비응축 )
무게	약 1.5 kg <p>배터리 포함</p>
외부 치수	약 270(W) × 26.4(H) × 290(D) mm
구성품	디지털 체중계 , "AAA" 배터리 4 개 , 사용 설명서 , 시작 가이드 , 보증서

참고 :

- 사양은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다 .
- 제품 생산 날짜가 기기에 인쇄되어 있습니다 : 첫 번째 4 자리는 생산연도 , 다음 2 자리는 생산 월 , 다음 2 자리는 생산 날짜를 의미합니다 .


<b>무선 통신 간섭 정보</b>
제품 내 블루투스 옵션은 모바일 기기의 전용 앱에 연결되어 모바일 기기의 날짜 / 시간 데이터를 제품과 동기화하며 , 제품의 측정 데이터를 모바일 기기와 동기화하는 데 사용됩니다 . 모바일 기기 의 세부적인 데이터 취급은 사용자 판단에 따라 결정됩니다 . 본 제품은 제 3 자가 알 수 없는 목적 으로 무선파를 고의적 또는 우발적으로 가로챌 수 있는 2.4GHz 의 자유 사용 ISM 대역폭에서 작 동합니다 . 본 제품을 전자레인지 및 무선 LAN 과 같이 다른 무선 기기 근처에서 사용할 경우 본 제 품과 동일한 주파수 대역폭에서 작동하기 때문에 간섭이 발생할 수 있습니다 . 간섭이 발생할 경우 다른 기기의 작동을 중지하거나 본 제품과 다른 무선 기기의 위치를 다시 조정한 후 사용하십시오 .

## 10. 지침 및 제조자 선언

- 여기서 OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 는 무선 장비 형식 HN-300T2 가 2014/53/EU 지 침을 준수함을 선언합니다 .
- EU 적합성 선언서는 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다 . https://www.omronhealthcare-ap.com/ap/support
- 이 제품은 OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan 의 엄격한 품질 시스템 하에 생산되었습니 다.

# CE

**이 제품의 올바른 폐기 방법 ( 전기 및 전자 기기 폐기 )**

<p>이 마크는 제품이나 인쇄물에 표기되어 있으며, 제품의 수명이 끝나 폐기할 경우에 기 타 다른 가정용 폐기품과 함께 폐기를 금하는 표시입니다. 무분별한 폐기로 인하여 환 경오염이나 인체에 해를 끼칠 수 있으니, 다른 폐기품과는 별도로 구분해 주시기 바라 며 재사용이 가능한 자원의 낭비를 막기 위해 재활용해 주시기 바랍니다.</p> <p>개인 소비자께서는 안전한 환경에서 이 제품이 재활용 될 수 있도록 공급처나 구입처, 가까운 지방관청에 제품의 폐기 방법을 문의해주시기 바랍니다.</p> <p>기업 소비자들은 공급자에게 연락을 하시고 공급계약의 약관을 확인해주시기 바랍니 다. 이 제품은 절대 다른 소비재 폐기품과 함께 버려져서는 안됩니다.</p>	
---	---

## 11. 보증

오므로 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 . 이 제품은 고품질의 재료로 만들어졌고 제조 과정에 세심 한 주의를 기울였습니다 . 사용 설명서에 설명된 대로 올바르게 작동시키고 유지 관리하는 경우 최상의 편안함을 제공하도록 설계되었습니다 .

이 제품은 구입 후 1 년간 오므론에서 품질을 보증해 드립니다 . 이 제품에 대한 적절한 제작 , 기술 및 재료를 오므론에서 보증합니다 . 이 보증 기간 동안 오므론은 인건비 또는 부품비를 청구하지 않 으며 , 결함 있는 제품과 부품을 수리하거나 교환해 드립니다 .

**이 보증은 한국에서 구입한 제품에만 적용됩니다 .**


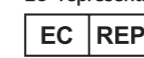
이 보증에는 다음 사항이 포함되지 않습니다 .

- 운송 비용과 운송에 대한 위험
- 인가받지 않은 사람의 수리로 인한 결함 및 / 또는 수리에 대한 비용
- 정기 점검 및 유지 관리
- 상기 보증 여부가 명시되어 있지 않은 경우나 , 본체 이외의 액세서리 또는 부속품의 고장 또는 마모
- 정구 사항을 수락하지 않아 발생한 비용 ( 비용을 지불하게 됨 )
- 개인적으로 우연히 발생되거나 오용으로 인한 것을 포함한 모든 종류의 손상

보증 서비스가 필요한 경우 한국 오므론 헬스케어에서 서비스를 제공할 것입니다 . 보증 서비스를 받으려면 먼저 제품을 구입한 대리점에 신청하십시오 . 이 품질 보증에 따라 수리 또는 교체하는 경우 보증 기간이 갱신되거나 연장되지 않습니다 . 소매점에서 소비자에게 발행한 영수증과 함께 전 제품을 반송하는 경우에만 보증이 제공됩니다 . 오므론에는 불확실한 정보가 제공된 경우 보증 서비스를 거절할 수 있는 권리가 있습니다 .

**Bluetooth**<sup>®</sup> 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 에서 소유한 등록 상표이고 OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 는 라이선스 하에 이러한 상표를 사용합니다 . 기타 상표 및 상호는 각 소유자의 것입니다 .

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가와 지역에서 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 . App Store 는 Apple Inc 의 서비스 마크입니다 . Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다 . 기타 상표 및 상호는 각 소유자의 것입니다 .

<div><b>Manufacturer</b></div> <div><b>제조회자</b></div> <div></div>	<div><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b></div> <div>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN</div>
<div><b>EU-representative</b></div> <div></div>	<div><b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b></div> <div>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS</div> <div>www.omron-healthcare.com</div>
<div><b>Importer in EU</b></div>	
<div><b>Asia Pacific HQ</b></div>	<div><b>OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD.</b></div> <div>www.omronhealthcare-ap.com</div>
<div><b>Production facility</b></div> <div><b>제조자</b></div>	<div><b>KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD.</b></div> <div>No. 28, Xingyang Road</div> <div>Economic Development Zone</div> <div>Yangzhou, Jiangsu 225009, China</div>
<div><b>Importer in Republic of Korea</b></div> <div><b>수입판매원</b></div>	<div><b>OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd.</b></div> <div>A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea</div> <div>Customer Service Center(1544-5718)</div> <div>www.omron-healthcare.co.kr</div> <div><b>한국오므론헬스케어 (주)</b></div> <div>서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층(서초동, 교보타워)</div> <div>오므론 고객센터 센터(1544-5718)</div>

사용설명서 작성년월 2022년02월

Made in China